



Littmann®
Stethoscopes

Очистка и уход за стетоскопом 3M™ Littmann™

Стетоскоп 3M™ Littmann™ создан для того, чтобы служить Вам многие годы.
Регулярная очистка Вашего стетоскопа поможет сохранить оптимальное качество звука при аускультации.



Очищать стетоскоп необходимо после каждого использования и непосредственно перед использованием.

Очистка стетоскопа является довольно простой процедурой. Для обработки требуется протереть всю поверхность диафрагмы и/или воронки тампоном, пропитанным 70% изопропиловым спиртом.

Не забывайте также очищать трубку стетоскопа.

Мы рекомендуем производить очистку трубки с помощью мягкой ткани, смоченной в слабом мыльном растворе, либо с помощью тампона, пропитанного 70%-м изопропиловым спиртом.

Для дезинфекции стетоскопа также может быть использован 2%-й раствор хлора, однако при чрезмерном использовании этого средства может наблюдаться незначительное изменение цвета трубки, связанное с воздействием хлора.

- Не подвергайте Ваш стетоскоп стерилизации.
- Не погружайте Ваш стетоскоп в жидкости.

3M стало известно, что некоторые врачи используют антисептики для обработки рук для очистки своего стетоскопа. Антисептики содержат увлажняющие средства, которые могут вызвать разбухание и выпадение мембраны стетоскопа, поэтому такая практика не рекомендуется.

www.littmann.ru

Товар зарегистрирован на территории РФ. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией и/или получить консультацию специалиста.